

Guide rapide

Modèle CL-60
Modèle CL-35

Sans fil amplifié
DECT avec afficheur
parlant et confirmation
de composition.


Serene Innovations inc.
14 615, Carmenita Road,
Norwalk, CA 90650
Tél : 562-407-5400



Contenu de l'emballage




Combiné

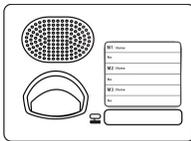

Base



Guide

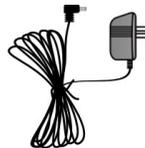

Adaptateur CA




Cordon de ligne




Piles rechargeables (2)
pour le combiné

Installation

1. Installer les piles du combiné
(incl.) et de la base (non incluses)
tel qu'illustré.

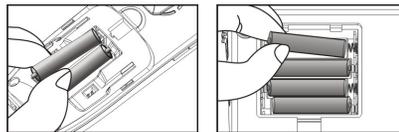

2. Branchez l'adaptateur CA et
le cordon de ligne à la base tel
qu'illustré.

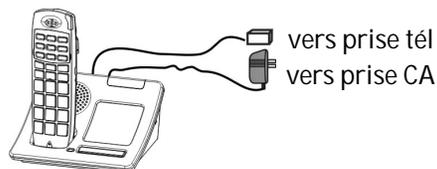

3. Recharger le combiné 24 heures (ou durant la nuit) avant
l'usage initial

*Note : Une pleine charge des piles du combiné peut donner
jusqu'à 8 heures de conversation (80 heures en attente)
Les piles dans la base peuvent donner environ 4 heures
d'utilisation (CL35 = 6 heures de conversation & 60 heures en
attente).*


**Après une panne de courant, l'enregistrement automatique du
combiné avec sa base pourrait prendre jusqu'à 1- 2 minutes.**

Échange des piles du combiné avec celles de la base


Les piles rechargeables du combiné et de la base sont
interchangeables. Si les piles du combiné deviennent faible, il est
acceptable de les échanger pour deux des piles rechargeables de
la base. Ceci réduit le temps de recharge du combiné.

Icones de l'écran ACL

1. Force du signal
2. Date et heure
3. Nouv. appels; s'éteint
après révision des appels
4. # d'appels non révisés;
(# anciens appels si "NEW"
est éteint)
5. Charge de la pile
(3 barres= max; 0=min)
6. Niveau Vol. - VL1 to VL5
7. Tonalité - T1 to T4
(Lorsque AMP activé)
8. Compteur de temps en ligne
9. (HH:MM:SS)

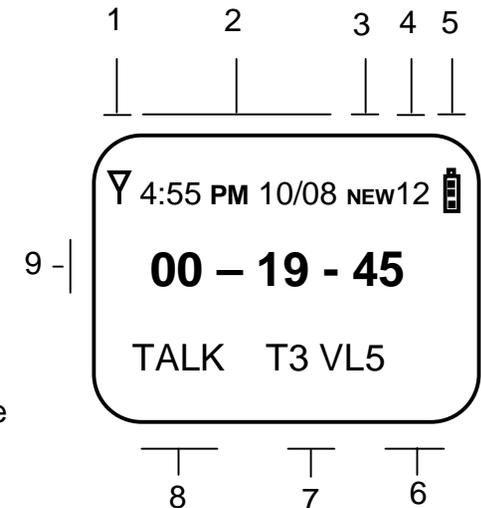

LISTE DES FONCTIONS

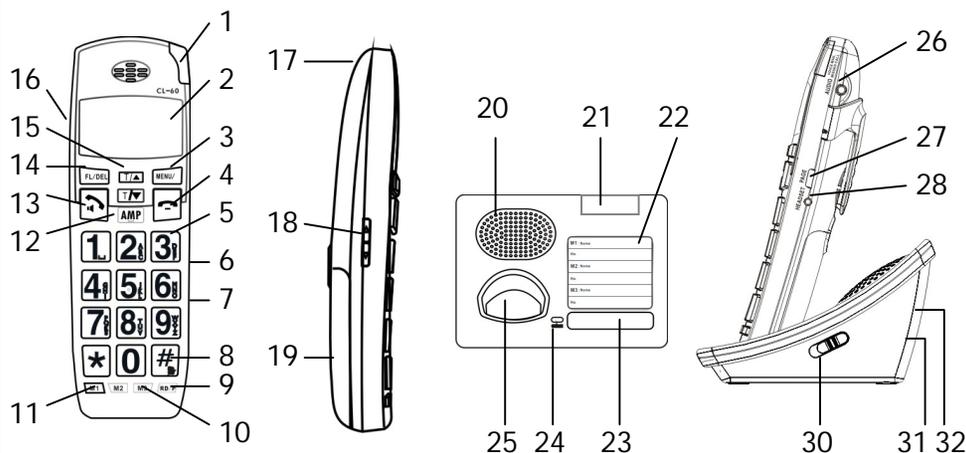

1. Indicateur : **En communication / sonnerie / messagerie / appel manqué**
2. **Écran ACL**
3. **Touche** : Pour accéder au menu ou sous-menus; durant un appel, active et désactive la fonction muet du microphone.
4. **Touche** : Pour terminer un appel (raccrocher).
5. **Clavier**
6. **Amplification auto:** Active l'amplification automatique.
7. **Afficheur parlant / Clavier parlant** Interrupteurs: (6 et 7 dans le compartiment de piles), CL-60
8. **Touche** : Maintenue durant 5 sec. active "ne pas déranger".
9. **Touche** : Recomposition / Pause.
10. **Touche** : Mémoire programmable 1 touche
11. **Touche** : Mémoire à 1 touche qui active le main libre.
12. **Touche** retro éclairée : Active l'amplificateur pour plus de volume au combiné.

13. **Touche** : Pour faire ou répondre à un appel. Pendant un appel, il sert à activer le main libre.
14. **Touche** : Active le transfert d'un appel en attente
15. et : Pour ajuster la tonalité et naviguer dans les fonctions du menu.
16. **Haut Parleur**
17. **Trou pour dragonne (non incluse)**
18. **Contrôle de volume**
19. **Porte du compartiment de pile**
20. **Sonnerie de la base**
21. **DEL clignotant de la base ; en ligne et sonnerie**
22. **Étiquette des touches mémoires**
23. **Touche recherche (PAGE)**
24. **Indicateur de charge**
25. **Socle de charge**
26. **Prise audio 3,5 mm (sortie seulement), CL-60**
27. **Touche PAGE**
28. **Prise pour Micro Casque 2,5mm**
29. **Pince de ceinture**
30. **Ctrl volume de sonnerie de la base, CL-60**
31. **Prise de l'adaptateur CA (arrière)**
32. **Prise pour fil de ligne téléphonique (arrière)**

Répondre à un appel

1. Appuyez sur la touche  lorsque le téléphone sonne.
(Appuyez de nouveau sur  pour activer le main libre si requis).
2. Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Faire un appel


1. Composez le numéro et confirmer à l'écran.
2. Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne et composer.
(Appuyez sur la touche  de nouveau pour activerle main libre).
3. Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Amplification du volume et contrôle de tonalité

1. Pendant un appel, Appuyez sur la touche **AMP** pour activer et désactiver l'amplification. **Attention:** *Lorsqu'activé (Illuminé), il y a un niveau sonore très élevé à l'écouteur.*
2. Appuyez sur la touche   (sur le côtés) pour ajuster le volume (VOL1 à VOL5).
3. Lorsqueest **AMP** allumé, appuyez sur la touches **T▲** ou **T▼** pour ajuster la tonalité (T1 à T4) pour une meilleure compréhension des mots.

AMP Ampli automatique et interr. de fonctions vocales

1. Ouvrez le compartiment de piles afin de voir les 2 petits interrupteurs à l'intérieur.
2. Mettre l'interr. 1 à ON si vous voulez l'amplification automatique.
3. Mettre l'interr. 2 à ON afin d'activer l'afficheur et le clavier parlant.

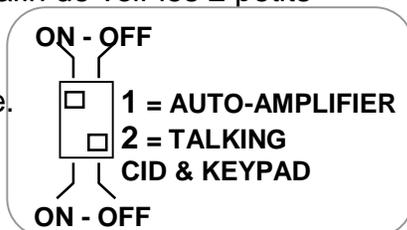

(Note: Ces deux fonctions peuvent être également changée dans le sous-menu **«REGL. COMB »**, vice-versa)

Programmation des mémoires à une touche

1. Hors ligne, composez le numéro à mémoriser.
2. Appuyez et maintenez enfoncée sur la touche **M3** (ou M1, M2) pendant 5 secondes pour sauvegarder le numéro.

Composition par mémoire à une touche

1. Lorsque hors ligne, appuyez sur la touche **M3** pour confirmer le numéro
2. Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne et composer.
3. Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Liste des appels composés

1. Lorsque hors ligne, appuyez sur la touche **T▼** afin de voir le dernier appel composé.
2. Appuyez sur la touche **T▲** ou **T▼** pour réviser les 10 derniers appels composés.
3. Pour appeler le numéro à l'écran, appuyez sur la touche .
(Pour le copier au répertoire, Appuyez sur la touche **MENU/☒** et allez au sous-menu. Appuyez sur la touche **MENU/☒** pour confirmer).
4. Appuyez sur la touche  pour terminer ou revenir hors ligne.

Liste des appels reçus

(Vous devez être abonné au service d'afficheur)

1. Hors ligne, appuyez sur la touche **T▲** pour réviser les appels reçus par l'afficheur.
2. Appuyez sur la touche **T▲** ou **T▼** pour naviguer dans la liste d'appels.
3. Pour appeler le numéro à l'écran, appuyez sur la touche .
(Pour le copier au répertoire, Appuyez sur la touche **MENU/☒** et allez au sous-menu. Appuyez sur la touche **MENU/☒** pour confirmer).
4. Appuyez sur la touche  pour terminer ou revenir hors ligne.

Créer le répertoire téléphonique

1. Lorsque hors ligne, appuyez sur la touche  et ensuite sur  pour aller jusqu'à "REPertoire".
2. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche  jusqu'à "AJOUT. ENTREE".
4. Appuyez sur la touche  pour confirmer. L'écran demande "NOM ?".
5. Entrez le nom et appuyez sur la touche  pour sauvegarder.
6. l'écran demande "NUMERO ?".
7. Entrez le numéro et appuyez sur la touche  encore.
8. L'écran montre "MELODIE 1" et joue cette mélodie.
9. Appuyez sur la touche  pour la garder. L'écran demande "AJOUT. ENTREE".
10. Appuyez sur la touche  pour terminer, ou recommencez à l'étape 4 pour une autre entrée.

Ajouter (enregistrer) un nouveau combiné

1. Appuyez et maintenez la touche  sur la base 5 secondes (l'action sera confirmée par un double bip et lumière DEL clignotante). La base restera en mode recherche jusqu'à 2 minutes.
2. Appuyez et maintenez la touche  du combiné 5 secondes.
3. Attendez la tonalité de confirmation.

Pas de sonnerie lors d'un appel (MODE "ne pas déranger")

1. Lorsque hors ligne, appuyez et tenez enfoncé  environ 5 secondes pour activer la fonction. L'écran alternera entre "NON DISTURB" and "COMB #". Le combiné ne sonnera pas.
2. Pour que le combiné sonne de nouveau, appuyez et tenez enfoncé  5 secondes pour désactiver "NON DISTURB".

Mise hors tension du combiné


1. Hors ligne, appuyez et maintenez enfoncé la touche  5 secondes pour mettre hors tension le combiné.
2. Pour remettre sous tension, appuyez et tenez  5 secondes.
3. Attendez la tonalité de confirmation avant utilisation. Elle indique que le combiné et la base se sont reconnus.

Réinitialisation aux réglages d'usine

(Le répertoire restera intact lors de cet opération)

1. Hors ligne, appuyez sur la touche  pour accéder au mode menu.
2. Appuyez  2 fois pour voir "REGL. COMB.". Appuyez la touche  pour choisir cette option l'écran affiche "REGL. AUDIO". Appuyez sur  et allez jusqu'à "REINIT. COMB".
3. Appuyez  pour confirmer et l'écran demandera "PIN ?".
4. Entrez le PIN par défaut "0000" et ensuite  pour confirmer.
5. Attendez la tonalité de confirmation, appuyez  pour sortir.

Pour référence seulement
Organigramme du menu

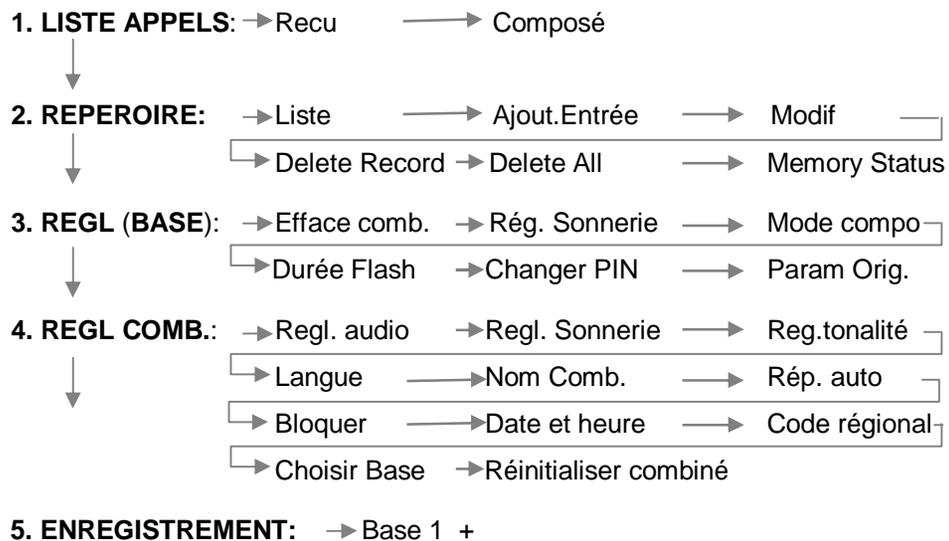

Naviguer entre les menus et sous-menus

1. Hors ligne, Appuyez sur la touche  et accédez au menu; L'écran affiche "LISTE APPELS".
2. Appuyez sur la touche  ou  pour naviguer dans les choix d'options du menu.
3. Appuyez sur la touche  pour choisir ce sous-menu.
4. Appuyez sur la touche  ou  pour naviguer dans le sous-menus; Appuyez sur la touche  pour choisir l'option du sous-menu; Appuyez sur la touche  et  pour continuer si nécessaire.
5. Appuyez sur la touche  pour choisir une option ou confirmer un changement.
6. Si nécessaire, appuyez sur la touche  pour revenir à une section antérieure du menu.
7. Lorsque terminé, Appuyez sur la touche  pour sortir et revenir en mode hors ligne.

Dépannage

Q1: L'indicateur de charge de la base n'est pas allumé lorsque le combiné est dans son socle.

Rép.: Repositionnez le combiné pour un meilleur contact.

Q2: Lors d'un appel entrant, aucune information ne s'affiche.

Rép.: Vérifiez que vous êtes bien abonné au service d'afficheur de votre compagnie de téléphone.

Q3: Pas de tonalité.

Rép.: Vérifiez que le fil de ligne téléphonique et l'adaptateur CA sont bien branchés aux deux extrémités. Assurez vous que vous n'êtes pas trop loin et hors portée de la base. Si votre téléphone est neuf, vous devez l'enregistrer à la base avant de pouvoir l'utiliser.